



Grundschule und
SBBZ – Förderschwerpunkt Lernen

Neue Schnelltestvariante an der Teckschule

Stand 12.05.2021

Liebe Eltern der Teckschule,
in dieser Woche wurden der Teckschule neue Corona-Schnelltests geliefert. Zu unseren bereits bekannten **Nasenabstrichstests (ROCHE)** wurden nun zusätzlich **Spucktests der Firma Anbio Biotech** geliefert. Auch diese werden ab jetzt bei der Schülertestung an der Teckschule zum Einsatz kommen. Die Testart spielt für die Umsetzung der Schülertestung an der Teckschule keine Rolle. Sowohl der zeitliche Rahmen als auch der Testraum können bei beiden Testvarianten bestehen bleiben. Die Durchführung des Spucktests erläutern wir Ihnen im Folgenden. Wichtig ist, dass die Kinder 30 Minuten vor Probeentnahme keine Lebensmittel oder Getränke zu sich nehmen sollten, um ein unverfälschtes Testergebnis zu gewährleisten. Wir bitten Sie dies zu beachten.

Angaben zur Durchführung des Covid-19 Antigen Test (Spucktest)

Der Spucktest besteht aus einer Testkassette, einer Einwegpipette, einem Speichelsammelgefäß mit Extraktionslösung und einem Trichter.

1. Der Trichter wird in das Sammelgefäß gesteckt.
2. Der Speichel wird durch Räuspern gelöst.
3. Über den Trichter wird der Speichel in das Sammelröhrchen gespuckt.
4. Das Sammelröhrchen wird verschlossen und zehnmals kräftig geschüttelt.
5. Mithilfe der Einwegpipette werden 3 Tropfen der Speichelentnahme auf die Testkassette gegeben.
6. Nach 15 Minuten kann das Testergebnis abgelesen werden.

Genauere Informationen zur Durchführung des Spucktest der Firma Anbio Biotech können Sie zudem unter folgendem Link erhalten:

<https://deref-web.de/mail/client/Qlgn6V8AKpE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.lgc-hygiene.de%2Fde%2FHYGISUN-Anbio-Biotech-Covid-19-Antigen-Schnelltest-Spucktest-Kolloidales-Gold-Laientest%2FLGC10032.1>

Herzliche Grüße
Die Schülertestgruppe der Teckschule

